

過酢酸の有効濃度確認

Peracid Test For Peracetic Acid

— 過酢酸濃度の確認用テストストリップ —



過酢酸系除菌洗浄剤を用いて医療器具・器材を除菌洗浄する際に、使用する除菌洗浄剤の過酢酸濃度を簡易的に確認することが出来ます。

Peracid Test 試験紙で対象となる除菌洗浄剤の過酢酸濃度が適正な濃度にある事を確認してご使用いただくことで、有効な除菌効果が得られます。

Peracid Test (以下 Test strip) の使用方法及び注意点

使用方法


- ① 使用中の過酢酸系除菌洗浄剤に Test stripを1秒間つけます。
- ② Test stripについている余分な除菌洗浄剤をやさしく振り落とします。
- ③ 30秒後に現れている色と標準反応色を比べ数値を確認後、結果を判断します。

「スコテリン」の有効濃度確認において、この時の結果が500ppm以上の反応色であれば、スコテリンの除菌効果は維持されています。

注意点

- ① Test stripは、直射日光を避け室温にて保存してください。
- ② Test strip取り出し後は、速やかに蓋を閉じてください。(湿り気遮断)
- ③ Test stripに現れる色の結果判読は、30秒後を厳守してください。
(時間が経過するに従い色が濃くなり、正確な結果を得る事ができません)
- ④ Test stripの反応をみる部分は手で触ったり測定時の対象溶液以外触れないでください。
- ⑤ Test stripは単回使用のものです。再使用しないでください。

標準反応色表

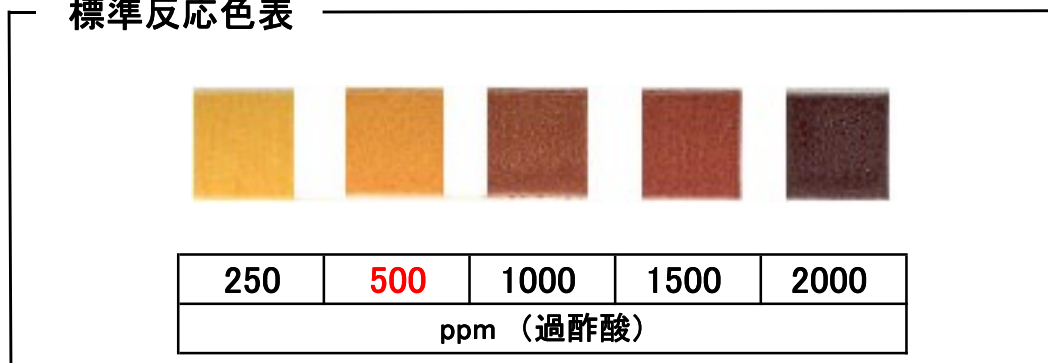

製品名: Peracid Test
包装: 100枚入り/個



ケイアールディジャパン株式会社

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西3丁目2番5号 村岡ビル2F
TEL 03-5659-2024 FAX 03-5659-2025