

# 過酢酸の残留確認

## RenalCheck PX For Residual Peroxide

— 過酢酸の残留は、過酸化水素で確認します —



過酢酸除菌洗浄剤にて浸漬された医療器具・器材を十分に水洗した後に RenalCheck PXにて過酢酸水素の残留を簡易的に確認する事ができます。水洗で残留が無い事を確認頂くことで、器材を安全にご使用いただく事と適切な洗浄方法への見直しを図ることができます。

### RenalCheck PX (以下 Test strip) の使用方法及び注意点


#### 使用方法

- ① 対象となる液体(または医療器具に付着している水滴)に、Test stripを1秒間つけます。
- ② Test stripについている余分な液体をやさしく振り落とします。
- ③ 15秒後に現れている色と標準反応色を比べ数値を確認後、結果を判断します。
- ④ この時の結果が0.5ppm未満であることをご確認下さい。0.5ppm以上の反応色であれば、残留も考えられますので水洗を追加してください。

#### 注意点

- ① Test Stripは、直射日光を避け、室温(15~30°C)にて保管してください。(冷蔵保存しないでください)
- ② 濡れた手によるTest Stripのお取り扱いはお止めください。
- ③ Test strip取り出し後は、速やかに蓋をしっかりと閉じてください。(湿り気遮断)
- ④ Test strip使用前に、Strip反応部分が緑がかった色をしている場合、正常な反応をしません。(湿気に反応した可能性があります)
- ⑤ Test stripの反応をみる部分は手で触ったり対象物以外触れないようにご注意ください。
- ⑥ Test stripは単回使用のものです。再使用しないでください。

#### 標準反応色表

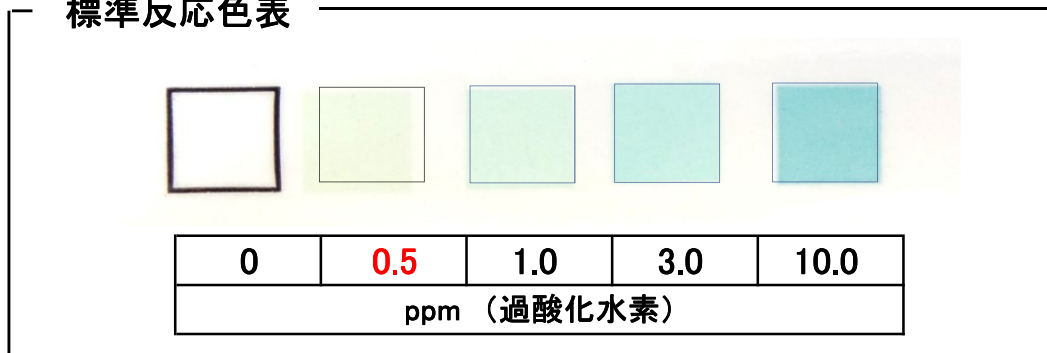

製品名: RenalCheck PX

包装: 100枚入り/個



ケイアールディジャパン株式会社

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西3丁目2番5号 村岡ビル2F  
TEL 03-5659-2024 FAX 03-5659-2025