



# ヘモクリーン C 簡易使用説明書

当除菌洗浄剤は、血液浄化(主に血液透析)にかかわる装置や配管に熱水を用いた消毒を行う際に用い、同時使用する事により除菌洗浄効果を発揮する製品です。

(熱水との併用でなければ用いる事が出来ません。また、一部使用できない機種もあります)\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> マテリアル適合表参照

## 事前準備

- CDDS(多人数用透析液供給装置)にて使用の場合、ヘモクリーン C を専用の外部タンクに移します。
- 個人用透析装置もしくは水処理装置にて使用の場合、装置専用の洗浄剤容器に移し(場合によりヘモクリーン C の容器をそのまま使用)、装置の洗浄剤導入ラインを接続し用います。

- ① 対象となる透析システム内を RO 水にて充分洗浄します。
- ② そのシステム内へ、ヘモクリーン C を 80℃以上に熱せられた RO 水と混合し、原液の約30倍(推奨)希釈液になるよう濃度を調整し充填します。
- ③ 対象となるシステム内に、希釈されたヘモクリーン C 溶液を濃度と80℃以上の温度を維持した状態で15分以上持続\*<sup>2</sup>させます。
- ④ その後、そのまま次の透析開始の準備まで、ヘモクリーン C 溶液を滞留(推奨)します。  
(滞留に関しましては、装置メーカー様にご相談下さい)
- ⑤ 透析開始前の事前洗浄として、充分な水洗を行い滞留していたヘモクリーン C を洗い流します。

- ◆ ヘモクリーン C 滞留中において、透析装置を緊急にご使用される場合の水洗時間は、透析液液置換に要する時間を参考に最短水洗時間\*<sup>3</sup>以上で充分な水洗をお願いします。

\*<sup>2</sup> 送液もしくは循環、高温の場合15分後のヘモクリーン C 溶液が80℃以上であること

\*<sup>3</sup> 導入時の確認を参照下さい

## 導入時の確認

- 導入時にヘモクリーン C 溶液充填後に RO 水による液置換を行い、RO 水の pH に到達するまでの時間をご確認いただき最短水洗時間\*<sup>3</sup>を把握しておいてください。

ケイアールディジャパン株式会社

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西3丁目2番5号村岡ビル2F  
TEL.03-5659-2024 FAX.03-5659-2025

# ヘモクリーン C ご使用上の注意

## (用法上の注意)

1. 透析関連装置専用用いるため、他の用途に使用しないこと。
2. 手指や皮膚、顔面(目)等に直接ヘモクリーン C が触れないこと。
  - \* 万が一、直接触れた場合はすぐに流水にて十分洗い流すこと。
  - \* 万が一直接接触により皮膚等に炎症が起こった場合は、すみやかに皮膚科または専門医師に受診すること。
  - \* 誤って眼に入った場合は、直ちに多量の水で洗った後専門医師に受診すること。
3. 他の洗浄剤や消毒剤、薬剤と混入・混合させないこと。
4. 80℃以上の熱水を用いた(併用)環境下で使用すること。
5. 除菌効果、洗浄効果を保つため、元に戻したり継ぎ足したりしないこと。<sup>注)</sup>

## (取り扱い上の注意)

1. 直射日光が当たらないようにすること。
2. 有効期限内に使用すること。

## (保管上の注意)

1. 室温にて保管すること。(推奨温度 1℃～30℃)
2. 直接日光および高温を避け保管すること。
3. 横倒ししないこと。
4. 子供の手が届かない場所に保管すること。

\* この製品は劇薬、劇物ではありません。

ケイアールディジャパン株式会社

〒134-0083東京都江戸川区中葛西3丁目2番5号村岡ビル2F  
TEL.03-5659-2024 FAX.03-5659-2025