

# 過酢酸の有効濃度確認

## HEMOCHECK Peracetic acid 2000

— 過酢酸濃度の確認用テストストリップ (Peracetic Acid Test Strips) —

過酢酸系除菌洗剤を用いて医療器具・器材を除菌洗浄する際に対象となる除菌洗剤の過酢酸濃度を簡易的に確認することが出来ます。

Peracetic acid 2000 で対象となる除菌洗剤の過酢酸濃度が適正な濃度にあることを確認後、ご使用いただくことで十分な除菌洗剤の効果が期待できます。

### Peracetic acid 2000 の使用方法及び注意点


#### 使用方法

- ① 使用中の過酢酸系除菌洗剤に Peracetic acid 2000を2秒間つけます。
- ② すみやかに取り出し、Peracetic acid 2000についている余分な除菌洗剤を払い落とします。
- ③ 20秒後に現れている色と標準反応色を比べ数値を確認後、結果を判断します。

「スコテリン」の有効濃度確認において、この時の結果が 500mg/L 以上の反応色であれば、スコテリンの除菌効果は維持されています。

#### 注意点

- ① Peracetic acid 2000 は、直射日光を避け室温(4~30℃)にて保管してください。(冷蔵保存しないでください)
- ② 濡れた手によるPeroxide 25 のお取り扱いはお止めください。
- ③ Peracetic acid 2000 取り出し後は、すみやかに蓋を閉じてください。(湿り気遮断)
- ④ Peracetic acid 2000 使用前に、strip反応部分に変色がないことをご確認ください。
- ⑤ Peracetic acid 2000 に現れる色の結果判読は、20秒後を目処に判読ください。(時間が経過するに従い色が濃くなり、正確な結果を得ることができません)
- ⑥ Peracetic acid 2000 の反応をみる判読部分は手で触ったり対象溶液以外触れないでください。
- ⑦ Peracetic acid 2000 は単回使用のものです。再使用しないでください。

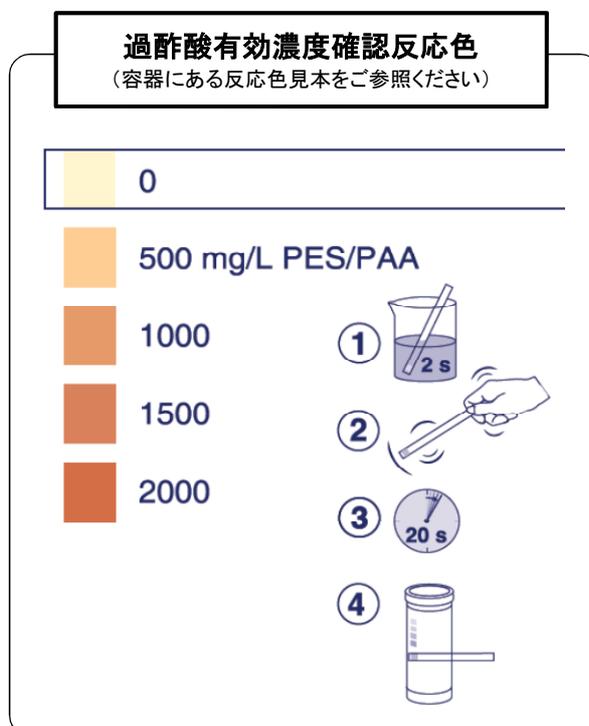

製品名：HEMOCHECK Peracetic acid 2000

包装：100枚入り/個

ケイアールディジャパン株式会社

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西3丁目2番5号 村岡ビル2F

TEL 03-5659-2024 FAX 03-5659-2025