

過酢酸の残留確認

HEMOCHECK Peroxide 25

— 過酢酸の残留は、過酸化水素で確認します (For Residual Peroxide) —

過酢酸除菌洗浄剤にて浸漬された医療器具・器材は、適性水により十分に水洗された後では過酸化水素の残留はありません(0.5mg/L未満)。もし残留が認められたならば、洗浄時間・方法等を見直し、適切な水洗方法を確立しなければなりません。

Peroxide 25 の使用方法及び注意点


使用方法

- ① 対象となる溶液(または医療器具に付着している水滴)に、Peroxide 25 を1秒間つけます。
- ② すみやかに取り出し、Peroxide 25 についている余分な溶液を払い落とします。
- ③ 15秒待ち、Peroxide 25 に現れている色と標準反応色表の色を比べ数値を確認し、結果を判断します。

〔この時の結果が0.5mg/L未満であることをご確認下さい。0.5mg/L以上の反応色であれば過酢酸の残留も考えられますので再水洗が必要です。〕

注意点

- ① Peroxide 25 は、直射日光を避け、室温(4~30℃)にて保管してください。(冷蔵保存しないでください)
- ② 濡れた手によるPeroxide 25 のお取り扱いはお止めください。
- ③ Peroxide 25 取り出し後は、すみやかに蓋をしっかりと閉じてください。(湿り気遮断)
- ④ Peroxide 25 使用前に、strip反応部分が緑がかった色や変色をしている場合は正常な反応をしません。(湿気に反応した可能性があります)
- ⑤ Peroxide 25 に現れる色の結果判読は、15秒後を目処に判読ください。(時間が経過するに従い色が濃くなり、正確な結果を得ることができません)
- ⑥ Peroxide 25 の反応をみる判読部分は手で触ったり対象物以外触れないようにご注意ください。
- ⑦ Peroxide 25 は、単回使用のものです。再使用しないでください。

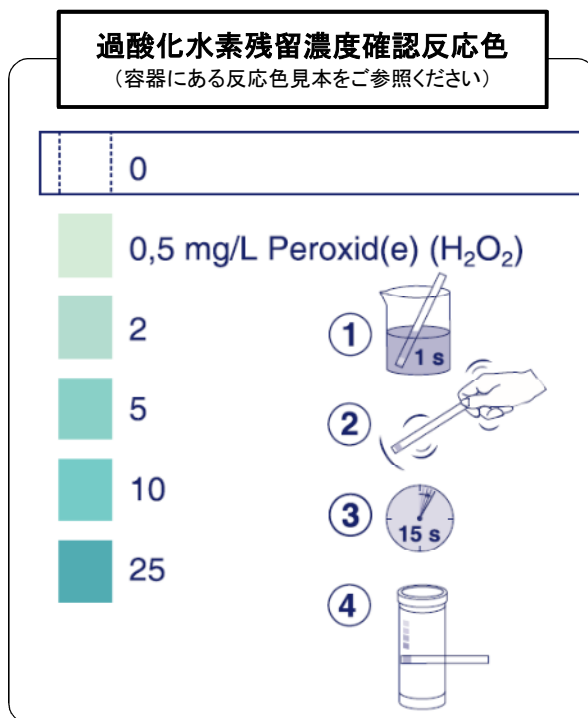

製品名：HEMOCHECK Peroxide 25

包装：100枚入り/個

ケイアールディジャパン株式会社

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西3丁目2番5号 村岡ビル2F

TEL 03-5659-2024 FAX 03-5659-2025